

Информация и инструкция по уходу за большим ортопедическим набором BIOMET3i

Ортопедический набор служит для установки абатментов, формирователей десны, установки винтов, а также, при обратном вращении, для их выкручивания.

Применение:

1. Выберите необходимый контроллер и вставьте его в наконечник. При правильном положении контроллер плотно зафиксирован в наконечнике.
2. Вставьте угловой элемент в наконечник для проверки вращения (рис.3). Установку углового элемента следует производить в следующей последовательности:
 - а) пальцем нажмите на специальный рычажок на конце наконечника
 - б) вставьте проверочный угловой элемент в наконечник
 - в) отпустите рычажок
 - г) проверочный угловой элемент должен плотно сидеть в наконечнике
 - д) проверьте вращение контроллера
 - е) зажмите проверочный угловой элемент и поверните контроллер до тех пор, пока не услышите щелчок
 - ж) удалите проверочный угловой элемент и вставьте необходимую отвертку, таким же способом
- 3) Сообщите пациенту о том, чтобы он не волновался, когда услышит щелчок. Щелчок сообщает о том, что было достигнуто необходимое усилие при закручивании

Информация по уходу за набором:

1. Наконечник следует стерилизовать сразу же после каждого использования
2. Очистите внешние части наконечника щеткой под проточной водой
3. Наконечник и контроллеры необходимо смазывать после каждого использования
Рекомендуется наносить каплю смазки в начало наконечника, в конец и в контроллеры
4. Перед автоклавированием необходимо отсоединить контроллеры от наконечника
5. Убедитесь, что все элементы полностью высушены перед запечатыванием

НЕ СТЕРИЛИЗОВАТЬ В ЖАРОВЫХ ШКАФАХ И В УСТРОЙСТВАХ ПО СУХОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ!

Информация по автоклавированию:

Неокрашенные элементы – 134° С – 25 минут
Окрашенные материалы – 134° С – 30 минут
Коробочка для хранения – 134° С – 35 минут